


Test procedure

Lees de instructies zorgvuldig door en laat het testapparaat en de monsters op temperatuur komen (15 °C -30 °C, voordat u gaat testen. U heeft minimaal 0,2 ml. speeksel nodig.

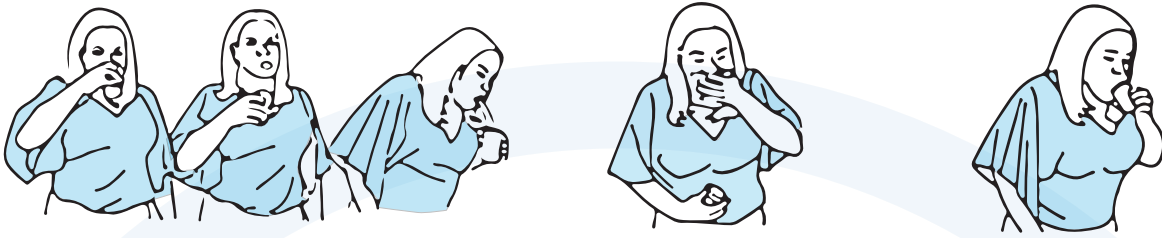


1. Spoel Je mond met water en spuug dit uit in de wasbak. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen overbodige mond bacteriën in het te testen speeksel achterblijven.

• Het wordt aanbevolen om de test 's morgens vroeg uit te voeren. ('s morgens vroeg bij het ontwaken, vóór het tandenpoetsen, mondspoeling en ontbijt)

2. Hoest diep, maak het geluid van "Kruuuu" uit de keel om het speeksel uit de diepe keel te verwijderen.


3. Zodra het speeksel in uw mond zit, spuugt u dit uit in het bijgeleverde zakje

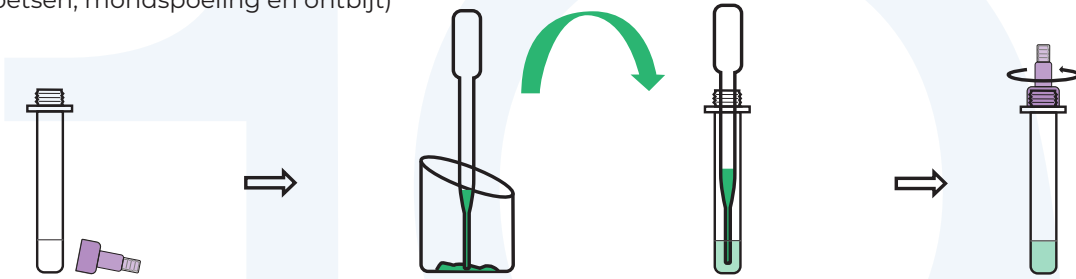

4. Schroef de dop van het monsterextractiebuisje los. Let Op! Er is al extractievloeistof in het buisje aanwezig!

5. Druppel 0.2 ml vers speekselmonster uit het zakje met de pipet in het monsterextractiebuisje


6. Draai de dop van het monsterextractiebuisje vast

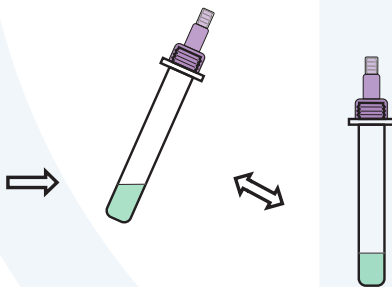

7. Schud en meng goed

8. Neem de testcassette uit de verpakking en leg deze op een tafel

9. Draai het kleine bovenste dopje van het monsterextractiebuisje af

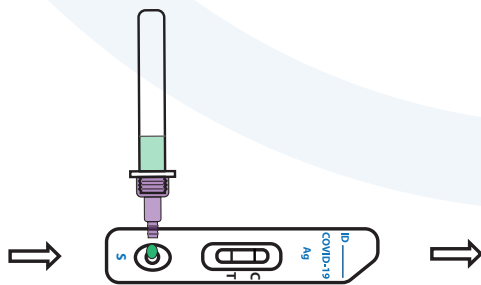

10. Voeg 3 druppels van het speekselmonster, gemengd met de extractievloeistof, verticaal in het monstergat toe.

Positief Negatief Ongeldig



11. Lees het resultaat na 15 minuten af. Als de resultaten 20 minuten of langer onzichtbaar blijven, zijn ze ongeldig en wordt een herhalingstest aanbevolen